

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПОДГОТОВКИ ЗАВЯЗОК (КРЕПЛЕНИЯ МАСКИ) ПО НЕОБХОДИМОЙ ДЛИНЕ.




1.

Исходная позиция.



2.

Шаг 1й, правильное завязывание узла.

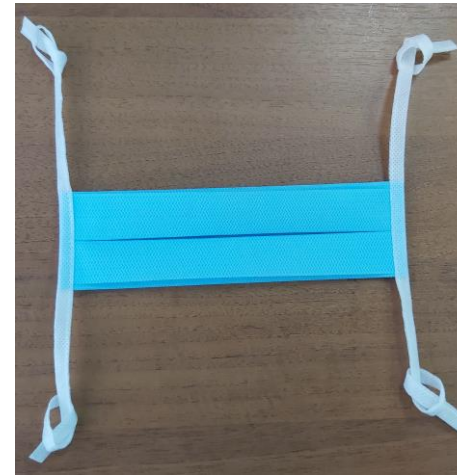

3.

Шаг 2й, подготовка узлов.




4.

Шаг 3й, затягивание узлов-ограничителей с одной стороны.



5.

Шаг 4й, продевание одного края завязки (с узлами-ограничителями) в петлю ослабленного узла противоположного конца завязки с левой стороны. С правой стороны тоже самое.

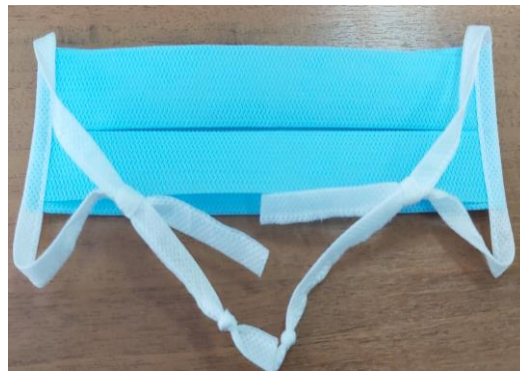

6.

Шаг 5й, затягивание петель ослабленных узлов таким образом, чтобы один край завязки (со скользящим узлом) перемещался по другому краю завязки (с узлом-ограничителем).



7.


Шаг 6й, одеваем маску развернутой частью к лицу, завязки на уши.



8.

Шаг 7й, одной рукой держим край завязки с узлом-ограничителем, другой рукой двигаем второй край завязки со скользящим узлом в направлении ушной раковины, придавая тем самым нужную длину для комфортного ношения.

МАСКА В РАСКРЫТОМ ВИДЕ (С ВНЕШНЕЙ СТОРОНЫ).

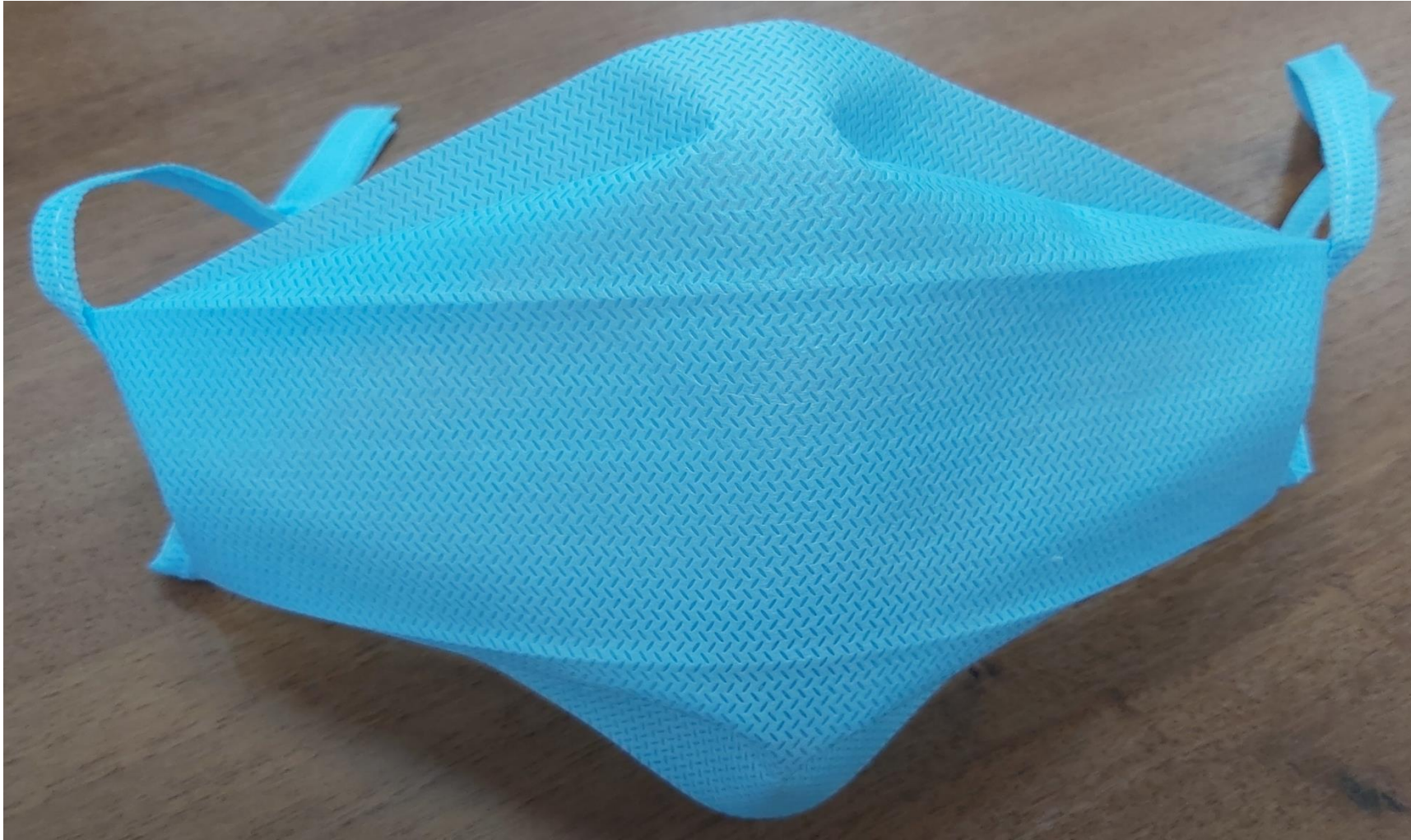

Лёгкая подгонка под любой размер. Распределяет давление на ушные раковины во время длительного ношения. Не уступает по надёжности креплению - на резинке.

Допускается многократное использование. Для обеззараживания необходимо сложить в посуду и залить кипятком или обработать паром.